

LESION TENDON FLECHISSEUR

Les lésions des tendons fléchisseurs font partie des lésions de tendon les plus longues à récupérer.

L'immobilisation dans une position spécifique de type DURAN ou MANCHESTER fait partie intégrante du protocole de rééducation MAPP primordial pour une récupération optimale.

L'orthèse est à garder 6 semaines 24h/24 sauf pendant les soins infirmiers et la rééducation.

Nos orthèses permettent une auto-mobilisation passive des doigts, à condition bien sûr d'avoir l'accord du chirurgien et du kinésithérapeute.






Si un 'pull out' a été réalisé pendant votre intervention vous aurez alors un fil sur l'ongle. Nous attirons votre attention sur le fait que ce fil ne doit JAMAIS être retiré en même temps que les autres fils situés au niveau de la peau.

Pourquoi une orthèse sur-mesure ?

Beaucoup plus légère et confortable que l'attelle post-opératoire en plâtre ou en résine, elle positionne de manière précise votre main, protégeant ainsi la réparation du tendon. Ce type d'appareillage n'existe pas de série. L'infirmier(e) qui refait le pansement tous les 2 jours peut repositionner très facilement cette orthèse contrairement à l'attelle post opératoire souvent mal repositionnée avec des bandages trop serrés. Elle permet en même temps de faire les exercices d'auto rééducation conseillés par votre kinésithérapeute indispensables à une bonne récupération.

En cas de traitement inadapté : risque élevé de raideur ou de rupture tendineuse.

Les orthèses fréquemment demandées :

Duran doigts longs	Duran pouce	Duran poignet	Duran doigts longs et pouce	Manchester doigts longs ou pouce
				

Nos orthèses sont réalisées selon la prescription médicale de votre médecin ou chirurgien.

Chaque orthèse est un dispositif médical personnalisé destiné à l'usage unique de la personne destinataire de la prescription.

Quand et combien de temps la porter ?

Le port de l'orthèse est permanent (24h/24), la durée totale vous sera précisée par le prescripteur.

Quelques conseils d'entretien :

Nous vous conseillons de porter sous l'orthèse un jersey tubulaire (ou une chaussette) qui absorbera la transpiration et que vous pourrez nettoyer régulièrement.

Vous pouvez nettoyer l'orthèse à l'eau claire et au savon doux à condition de bien la sécher avant de la remettre

L'orthèse se déforme à la chaleur. Attention de ne pas la laisser à proximité d'une source de chaleur importante.

En cas de douleur ou de blessure liée à l'orthèse, merci de nous contacter rapidement !