

ARTHROSE DIGITALE

L'arthrose digitale est une destruction progressive des cartilages d'une ou deux articulations du doigt.

L'atteinte de l'articulation Interphalangienne distale "IPD" débute très souvent par des nodules (petites boules) situés sur l'articulation juste en arrière de l'ongle, et peut s'accompagner de déviation de la dernière phalange.

L'atteinte de l'articulation Interphalangienne proximale "IPP" provoque généralement une augmentation du volume de celle-ci pendant les phases de poussée arthrosique et est accompagnée de douleur et d'impotence fonctionnelle.

Pourquoi une orthèse sur-mesure ?

Une orthèse sur mesure permet une immobilisation précise de l'articulation dans un matériau confortable. Le but est d'éviter une accentuation des déformations et de soulager les douleurs.

En cas de traitement inadapté : risque de déformation des articulations importantes et/ou d'impotence fonctionnelle.

Les orthèses fréquemment demandées :

<p>Segmentaire de doigt P1 P3</p> 	<p>Segmentaire de doigt P2 P3</p> 	<p>Nos orthèses sont réalisées selon la prescription médicale de votre médecin ou chirurgien.</p> <p><i>Chaque orthèse est un dispositif médical personnalisé destiné à l'usage unique de la personne destinataire de la prescription.</i></p>
---	---	--

Quand et combien de temps la porter ?

Le port de l'orthèse se fait principalement la nuit sauf lors des phases de poussée arthrosique où elle pourra être portée la journée également.

Quelques conseils d'entretien :

Vous pouvez nettoyer l'orthèse à l'eau claire et au savon doux à condition de bien la sécher avant de la remettre.

L'orthèse se déforme à la chaleur. Attention de ne pas la laisser à proximité d'une source de chaleur importante.

En cas de douleur ou de blessure liée à l'orthèse, merci de nous contacter rapidement !